

INSTRUÇÃO DE USO

Cateter Extrator de Cálculo U-Perc Nitinol ALLWIN

Indicação

O Cateter Extrator de Cálculo U-Perc Nitinol ALLWIN está indicado para extração percutânea de cálculos renais.



Condições de Armazenamento e Transporte

O produto deve ser armazenado e Transportado em temperatura ambiente (10°C a 35°C), em local fresco, seco e limpo.

Advertência / Precauções

- Para uma única utilização;
- Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada;
- Não reutilize o produto, se o produto for utilizado, pode não fornecer o resultado desejado, pode causar complicações.
- Descarte de acordo com reconhecida prática médica e sob a observância da lei e regulamentação aplicáveis.
- Teste a manopla antes do uso para garantir o bom funcionamento do dispositivo. Evite o contato com instrumentos elétricos.
- Só o médico treinado em manipulação de cálculos deve realizar este procedimento. Uma variedade de técnicas podem ser utilizadas, no entanto o médico deve usar a técnica com a qual ele é mais confortável.
- Verifique a Compatibilidade com o canal de trabalho do endoscópio.



Contra-indicação

Não é adequado para uso com cesta litotriptor.

Efeitos Adversos

O produto pode causar possíveis complicações, não estão limitadas a irritação da mucosa, inflamação e perfuração da uretra, da bexiga, ou ureter.

Informações sobre esterilização

Produto ESTÉRIL

Esterilização por Óxido de Etileno (EtO)

Modo de de uso

- Teste a manopla antes do uso para garantir o bom funcionamento do dispositivo.
- Inserir o U-Perc através do canal de trabalho do endoscópio para capturar cálculos.
- Uma vez que o cálculo foi capturado no cesto, é necessário puxar gradualmente de modo que não haja danos na mucosa.
- O Auxílio de uma visualização fluoroscópica pode ser vantajosa.
- Para uma única utilização.

Fabricado por:

ALLWIN MEDICAL DEVICES

Plot # 223, Surat Special Economic Zone,
Sachin, Surat – 394 230, Gujrat, Índia

Distribuidor por:

ALLWIN MEDICAL DEVICES

3305 E. Miraloma AVE.,
Suite 180. ANAHEIM, USA

Importado e distribuído por:

EIC Brasil Exportadora de Produtos Industrializados Ltda.

Rua Teixeira da Silva, 54 cjs. 91, 92, 93 e 94 - Paraíso

04002-030 – São Paulo – SP

CNPJ: 09.209.604/0001-17

Tel: 11 4371-1555

Responsável técnico: Eva Oselka

CRF/SP: 27.331

Registro ANVISA nº 80518270006