




INSTRUÇÃO DE USO

Cateter Ureteral Allwin

Esta Instrução de uso se aplica aos modelos: UC - AR 3; UC - AR 4; UC - AR 5; UC - AR 6; UC - AR 7; UC - AO3; UC - AO4; UC - AO5; UC - AO6; UC - AO7; UC - R 3; UC - R 4; UC - R 5; UC - R 6; UC - R 7; UC - O3; UC - O4; UC - O5; UC - O6; UC - O7;

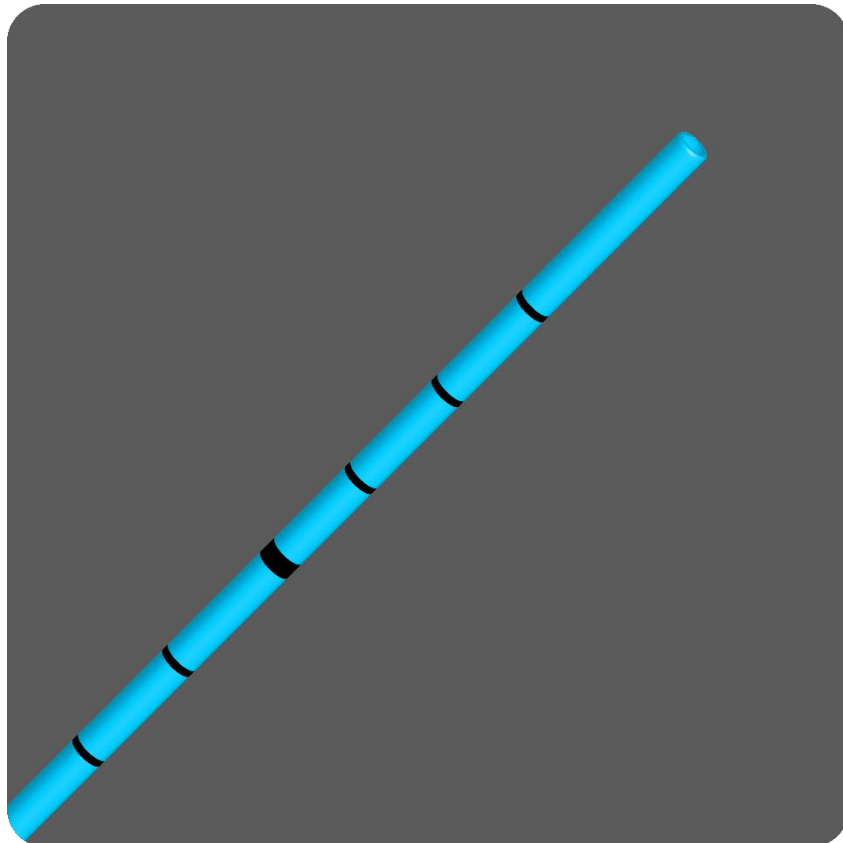



INSTRUÇÃO DE USO

Cateter Ureteral Allwin

DESCRIÇÃO

O **Cateter Ureteral Allwin** é um produto médico atóxico esterilizado por **óxido de etileno**.

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

O **Cateter Ureteral Allwin** tem como princípio drenar a urina do ureter em cirurgias.

APRESENTAÇÃO

O produto é embalado individualmente em Bolsa Tyvek (Polietileno) e por fim embalado em caixa de papelão (celulose), caixa com 10 unidades.



CARACTERÍSTICAS

Código	Descrição	Fr	Dimensões (cm)
UC - AR 3	Cateter Ureteral Allwin - ponta curva fechada	3	70
UC - AR 4		4	
UC - AR 5		5	
UC - AR 6		6	
UC - AR 7		7	
UC - A03	Cateter Ureteral Allwin - ponta curva aberta	3	70
UC - A04		4	
UC - A05		5	
UC - A06		6	
UC - A07		7	
UC -R 3	Cateter Ureteral Allwin - ponta reta fechada	3	70
UC -R 4		4	
UC -R 5		5	
UC -R 6		6	
UC -R 7		7	
UC - O3	Cateter Ureteral Allwin - ponta reta aberta	3	70
UC - O4		4	
UC - O5		5	
UC - O6		6	
UC - O7		7	

COMPOSIÇÃO

Cateter - polietileno (tereftalato)

Conector Luer Lock: Polímero de PVC grau médico

Estilete: Mono filamento de Nylon



INSTRUÇÕES DE USO

-Utilize técnicas assépticas durante os procedimentos: luvas, gorro, máscara e instrumentos estéreis.

-Faça a assepsia da genitália do paciente.

-Retirar o produto da embalagem em condições assépticas.

-A introdução do cateter deve ser feita com ajuda de um cistoscópio, de acordo com a preferência do médico.

-Quando o cateter for introduzido com fio guia previamente posicionado, o estilete deverá ser retirado antes da introdução. Quando usado sem o estilete, o cateter se torna consideravelmente mais flexível e mais suscetível a dobras.

-Para introdução com cistoscópio, assegurar que o estilete esteja completamente introduzido no cateter, de maneira que não esteja saindo pela ponta. O posicionamento incorreto do estilete pode causar perfuração do ureter.

-Mantendo a posição do estilete, introduzir o cateter através do cistoscópio e continuar a avançar até o ureter, guiado com controle radiológico até que a ponta do cateter esteja colocada na posição desejada.

-Nesse momento o médico deverá decidir pela retirada ou não do cistoscópio.

-Remover e descartar o estilete.

-Após o posicionamento desejado do cateter, o conector Luer Lock poderá ser usado. O produto é indicado para uso transitório, ou seja, menos de 60 minutos.

INDICAÇÃO DE USO

O **Cateter Ureteral Allwin** é utilizado para drenar a urina do ureter em cirurgias. Fabricado em polietileno (tereftalato), é fornecido com conector Luer Lock fabricado em polímero de PVC grau médico, e estilete confeccionado com mono filamento de nylon que se ajusta ao tamanho do cateter.

CONTRAINDICAÇÕES

- - Contraindicado para cateterização ureteral em pacientes com obstrução estenótica grave
- - O produto não deve permanecer por mais de 30 dias no paciente.



ADVERTÊNCIAS

- - PROIBIDO REPROCESSAR.
- - O cateter ureteral deve ser utilizado apenas por médicos ou outros profissionais qualificados, e com equipamentos indicados para colocação desse tipo de dispositivo.
- - O paciente deve ser monitorado de acordo com procedimentos adequados.
- - Perfuração ureteral, irritação ureteral, danos na mucosa, desconforto e infecção são complicações conhecidamente associadas à colocação de cateteres no trato urinário superior.

PRECAUÇÕES

- Somente utilizar o produto se a embalagem estiver íntegra. Utilizar antes que expire a data de validade da esterilização indicada na embalagem.
- Depois de utilizar o produto deve ser descartado de acordo com as normas locais de manuseio de resíduos potencialmente infectados.
- Não utilizar o produto se a embalagem estiver danificada.

Descartar o produto em conformidade sob observância da legislação aplicável.
Produto limitado a uso médico restrito.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

O produto deve ser armazenado em ambiente limpo e seco, não expor a solventes orgânicos, luz ultravioleta ou radiação ionizante, na temperatura de armazenamento entre 7°C a 32°C

Deve ser conservado e transportado em sua embalagem original até o momento de seu uso, na temperatura entre 7°C a 32°C. Transportar com o devido cuidado.

FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO

PRODUTO ESTÉRIL

ESTERILIZAÇÃO POR ÓXIDO DE ETILENO (ETO)

VALIDADE DO PRODUTO: 5 anos após a fabricação.



Fabricado e Distribuído por:

ALLWIN MEDICAL DEVICES
Plot # 223,
Surat Special Economic Zone,
Sachin, Surat – 394 230, Gujarat
Índia

Distribuído por:

ALLWIN MEDICAL DEVICES
3305 E. Miraloma AVE.,
Suite 176. – ANAHEIM, CA 92806
Estados Unidos

Importado e distribuído por:

EIC Brasil Exportadora de Produtos
Industrializados Ltda.
Rua Teixeira da Silva, 54 cjs. 91, 92, 93
e 94 - Paraíso
04002-030 – São Paulo – SP
CNPJ: 09.209.604/0001-17
Tel: 11 4371-1555
Responsável técnico: Eva Oselka
CRF/SP: 27.331

Registro ANVISA nº 805118270018