

## INSTRUÇÃO DE USO

---

### Sonda de Acesso Ureteral U-Flex ALLWIN

#### Indicação

A Sonda de acesso ureteral U-Flex ALLWIN, foi desenvolvida a promover uma manipulação mais fácil e menos traumática durante a ureteroscopia.



#### Condições de Armazenamento e Transporte

O produto deve ser armazenado e transportado em temperatura ambiente (10°C a 35°C), em local fresco, seco e limpo.

#### Advertência e Precauções

- Este dispositivo é fornecido estéril e destinado a uma única utilização.
- Não reutilize o produto, se o produto for utilizado, pode não fornecer o resultado desejado, pode causar complicações.
- Não use se a embalagem estiver aberta ou danificada.
- Este dispositivo deve ser manipulado apenas por Cirurgiões experientes.

#### Contra-indicações

Este dispositivo é contra-indicação em pacientes que não toleram procedimentos urológicos retrógrado.

#### Complicação potencial

Complicações podem incluir, mas não estão limitados a irritação da mucosa, inflamação e perfuração da uretra, da bexiga, ou ureter.

#### Informações sobre esterilização

Produto ESTÉRIL

Esterilização por Óxido de Etileno (EtO)

**Modo de uso**

1. Usando o procedimento padrão, um fio-guia compatível é colocado no trato urinário.
2. Ativar o revestimento hidrofílico, colocando sonda/dilatador em água estéril / solução salina durante 30 seg.
3. Insira o dilatador dentro da sonda e verifique se o encaixe está seguro.
4. Avançar a sonda/dilatador sobre o fio-guia para o local desejado.  
Após a confirmação da colocação adequada através de fluoroscopia remover o dilatador suavemente. Manter posição da sonda.
5. Sob nenhuma circunstância avançar a sonda sem dilatador.
6. Se necessário, a sonda deve ser protegida usando os orifícios do funil da sonda.
7. Agora é possível usar a instrumentação desejada através da sonda, conforme necessário.
8. Retire a sonda suavemente.
9. Descartar em conformidade com o procedimento do hospital.

**Fabricado por:**

ALLWIN MEDICAL DEVICES

Plot # 223, Surat Special Economic Zone,

Sachin, Surat – 394 230, Gujrat

Índia

**Distribuidor por:**

ALLWIN MEDICAL DEVICES

3305 E. Miraloma AVE.,

Suite 180. ANAHEIM, USA

**Importado e distribuído por:**

EIC Brasil Exportadora de Produtos Industrializados Ltda.

Rua Teixeira da Silva, 54 cjs. 91, 92, 93 e 94 - Paraíso

04002-030 – São Paulo – SP

CNPJ: 09.209.604/0001-17

Tel: 11 4371-1555

Responsável técnico: Eva Oselka

CRF/SP: 27.331

Registro ANVISA nº 80518270005